

ORO-BABY NEB MECHANINIS INHALIATORIUS RAUSVAS/MĒLYNAS

INSTRUKCIJA

Jūsų kompresorinis purkštuvas turi būti naudojamas prižiūrint licencijuotam gydytojui ir (arba) kvėpavimo terapeutui. Rekomenduojame atidžiai perskaityti šį vadovą, kad sužinotumėte apie šio gaminio savybes. Visada reikia vengti bet kokio šio gaminio naudojimo kitaip nei numatyta.

LAIKYMO ĮSPĖJIMAI

- Nelaiykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, aukštoje temperatūroje ar drėgnoje vietoje.
- Laikykite įrenginį mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Visada laikykite įrenginį atjungtą nuo elektros tinklo, kai nenaudojate.

VALYKITE ATSARGIAI

- Nenardinkite įrenginio į vandenį. Tai gali sugadinti įrenginį.
- Prieš valydami įrenginį atjunkite nuo elektros lizdo.
- Po kiekvieno naudojimo išvalykite visas reikalingas dalis, kaip nurodyta šiame vadove

KOMPRESORIO NEBULIZATORIAUS NAUDOJIMAS

Pastaba: prieš pradėdami eksploatuoti purkštuvą reikia kruopščiai išvalyti.

- Padėkite kompresorinį purkštuvą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Įsitinkinkite, kad sėdėdami lengvai pasieksite valdiklius.
- Švelniai pasukite viršutinę purkštovo dalį prieš laikrodžio rodyklę, kad išardytumėte purkštuvą.
- Apatinę purkštovo dalį užpildykite gydytojo paskirtais vaistais. Įsitinkinkite, kad kūgis yra apatinėje dalyje.
- Švelniai pasukite viršutinę dalį pagal laikrodžio rodyklę, kad vėl surinktumėte purkštuvą. Įsitinkinkite, kad dvi dalys gerai tinka.
- Pritvirtinkite vieną oro vamzdelio galą prie purkštovo pagrindo.
- Kitą oro vamzdelio galą prijunkite prie vamzdelio jungties, esančios

kompresoriaus priekyje.

- Pritvirtinkite kandiklį arba kaukę pagal savo pasirinkimą viršutinėje purkštuvo dalyje.
- Įkiškite maitinimo laidą į atitinkamą elektros lizdą. Įsitinkinkite, kad šiame etape maitinimo jungiklis yra „Išjungtas“.
- Paspauskite maitinimo jungiklį, kad pradėtumėte paskirtą gydymą.

SVARBU

Kompresoriaus variklis turi šiluminę apsaugą, kuri išjungs įrenginį, kol įrenginys neperkais. Kai šiluminė apsauga išjungia įrenginį, prašome:

- Išjunkite įrenginį.
- Ištraukite įrenginį iš elektros lizdo.
- Prieš kitą procedūrą palaukite 30 minučių, kol variklis atvės. Įsitinkinkite, kad oro angos nėra užkimštos.
- Baigę gydymą, išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

SKALAVIMAS (PO KIEKVIENOS GYDYMO)

- Atjunkite oro vamzdelį, purkštuvą, kandiklį ir kaukę.
- Gently twist the nebulizer to open it. Švelniai pasukite purkštuvą, kad jį atidarytumėte.
- Nebulizatorių, kandiklį ir kaukę išskalaukite vandeniu.
- Nusausinkite švariu minkštu rankšluosčiu arba leiskite išdžiūti.
- Visiškai išdžiūvusį purkštuvą vėl surinkite ir sudėkite šias dalis į sausą, sandarų indą.

KOMPRESORIŲ VALYMAS

- Kaskart nuvalykite drėgna šluoste.
- Nenaudokite miltelių pavidalo valiklio ar muilo pagalvėlių, nes tai gali sugadinti apdailą.

FILTRO KEITIMAS

- Nenaudokite medvilnės ar kitų medžiagų. Neplaukite ir nevalykite filtro. Naudokite tik platintojo pateiktus filtrus. Ir nedirbkite be filtro.
- Keiskite filtrą kas 30 dienų arba tada, kai filtras pasidaro pilkas.

- Keitimo procedūra:
 - Nuimkite filtro dangtelį.
 - Panaudotą filtrą pakeiskite nauju.
 - Uždėkite filtro dangtelį.

KEIČIAMOSIOS DALYS IR PASIRENKAMIEJI PRIEDAI KŪDIKIŲ ČIULPTUKO INHALIATORIUI

Atsarginių dalių galite įsigyti per vietinį pardavėją arba jas galite užsisakyti el. paštu:

Papildomi priedai yra vaikų kaukė, nosies dalis ir kūdikio čiulptuko inhaliatorius.

Čiulptuko inhaliatorius leidžia kūdikiui lengvai gydytis aerozoliu normaliu kvėpavimu.

SPECIFIKACIJOS

Galia	220V, 50 Hz
Dabartinė	0.8A
Vaistų talpa	10 ml
Dalelių dydis	0.5 to 10 um
Garso lygis	≤ 65 dBA
Vidutinis purškimo greitis	≥0.25mL/min
Kompresoriaus slėgio diapazonas	22-58 Psi
Darbinio slėgio diapazonas	9.5-19Psi
Litrų srauto diapazonas	> 6.7lpm
Darbo temperatūros diapazonas	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Veikimo drėgmės diapazonas	10 to 95% RH
Laikymo temperatūros diapazonas	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Matmenys	230x115x240mm
Svoris	1.18 kg
Svoris su pakuote	1.49 kg
Standartiniai priedai	Nebulizatorius, oro vamzdelis, suaugusiųjų kaukė, vaikų kaukė ir burnos antgalis, filtrai (5)
Apsauga nuo elektros smūgio:	II klasės įranga

Platintojas Lietuvoje

MB Euromedika

T.Ševčenkos 16, korp.2

LT-03111 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 5 2151418

www.diaagnostikostestai.lt