

PASTABOS

Prašome informaciją šį testą. perskaityti visą prieš pradėdami atlikti šį testą.

Viola nėštumo testas yra pats jautriausias iš visų, kadangi nustato hCG hormoną šlapime jau nuo 5 mIU/ml (tarptautinių vienetų viename litre). Tai reiškia, kad Jūs galite atlikti testą nelaukdamas menstruacijų pradžios (apytiksliai praėjus 8 dienom po pastojimo).

Panaudoti testiniai komponentai (pavyzdžiui antikūniai) gali būti infekcijos šaltiniai, bet jie nėra pavojingi tuo atveju, jei viskas buvo atlikta laikantis instrukcijos nurodymų.

Testo sudėtis:

Dėžutė, folioje su pakuotas testas, drėgmę sugeriantis paketas ir informacinis lapelis. Papildomai Jums reikės:

Rezultatų langelis

Maksimalus prisipildymo lygis

Skylutė šlapimo mėginiui

Itin ankstyvas


TESTO ATLIKIMO BŪDAI

TIESIOGIAI



Laikykite testą po silpna šlapimo srove apie 3 sek.

NAUDOJANT INDELĮ

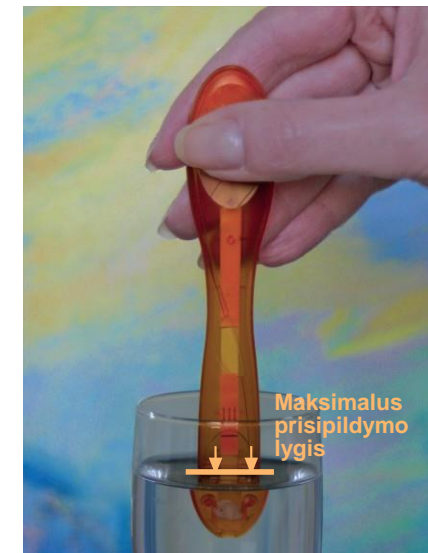

Įmerkite testą į indelį su surinktu šlapimo mėginiu apie 3 sek.
Dėmesio: pasiekite maksimalų prisipildymo lygį.

nėštumo nustatymo testas praėjus nuo pastojimo 8 dienom

Laikrodžio ir alternatyvai šlapimo mėginio surinkimo indelio. Padėkite testą su folija į šoną ir vertinkite testa praėjus **10-15 min** pagal instrukciją.

VERTINIMAS



Jeigu rezultato langelyje pasirodo tik **viena viršutinė purpurinė linija** (kontrolinė linija), vadinasi nebuvo aptikta hCG ir Jūs nesilaukiate. Panaudokite antrą Viola testą po kelių dienų.

Jeigu Jūsų menstruacijos vėluoja daugiau nei savaitę, rekomenduojame kreiptis į gydytoją ir vengtiriziką sveikatai turinčių veiksnių, tokių kaip rentgeno spindulių.



Jeigu rezultato langelyje pasirodo **dvi purpurinės linijos** (kontrolinė ir testinė linijos), vadinasi buvo aptiktas hCG ir Jūs esate **nėščia**, net jeigu linija esanti apačioje yra labai neryški. Neryški apatinė linija byloja apie nėštumo pradžią.

Kai apatinė linija yra labai neryški, tai reiškia, kad tai yra labai ankstyva nėštumo stadija. Priešgimdyvinė priežiūra

ums ir Jūsų kūdikiui, todėl prašome kreiptis į gydytoją. Venkite rinčių veiksnių, tokių kaip rentgeno spindulių.

Jei testo rezultatas yra teigiamas, bet Jūsų mėnesinės dar nevėluoja, mes patariame atlikti kitą ankstyvojo nėštumo testą Viola po kelių dienų.

Tolesnė informacija kitame stulpelyje.

Testas yra neveikiantis, jei rezultatų langelyje nepasirodo ne viena purpurinė linija po 15 – 20 min. arba jei pasirodo tik testinė linija (apatinė). Priežastys dėl kurių testas yra neveikiantis: netinkamos laikymo sąlygos, pažeista folijos pakuotė arba atlikimo klaida (per mažas šlapimo tūris).

Jei taip nutiko, prašome kreiptis į gamintoją.

Testo rezultatas nėra vertinamas praėjus 20 min po testo atlikimo.

Išmeskite panaudotą testą į šiukšliadėžę.

Gamintojas: CARE diagnostica GmbH, Roemerstrasse 8, 2513 Moellersdorf, Austria, E-Mail: mail@care.co.at, www.carediagnostica.com Platintojas Lietuvoje: UAB "OPTRONICA", T.Ševcenkos 16, korpusas 2, Vilnius 03111, Lietuva, Tel.: +370 5 2151418, www.diagnostikostestai.lt

Oficialus atstovas: : SelfDiagnostics OÜ, Pärnu mnt 27-1, Tallinn, 10141, info@selfdiagnostics.eu, www.tervisetestid.ee, Tel. +372 6604 742

TESTO INFORMACIJA

Daugelis pakitimų moters organizme yra reikšmingi normaliam nėštumui ir vaisiaus vystymuisi. Iš esmės tai yra hormonai, kurie padeda organizmui adaptuotis prie pasikeitusios būsenos. Patys svarbiausi hormonai yra estrogenai, progesteronai ir hCG. hCG hormono kiekis sveikos, nesilaukiančios moters šlapime yra 3 mIU/ml (tarptautinių vienetų viena- me litre). Nuo pat pirmųjų nėštumo dienų šio hormono ženkliai padaugėja. Iki 10-os nėštumo savaitės hormono kiekis išauga iki 230.000 mIU/ml.

Po gimdymo hormono kiekis normalizuojasi per keletą savaičių. Šis testas nustato nėštumą, kai hCG hormono padidėja iki 5 mIU/ml.

Klaidingai **neigiamo** atsakymo priežastys:

- hCG hormono kiekis gali didėti kiekvienai moteriai skirtingu greičiu, todėl jo kiekis gali būti per žemas, kad galima būtų nustatyti nėštumą labai ankstyvoje stadijoje.
- jei šlapimas yra labai skiestas, testas gali parodyti neigiamą atsakymą.

Klaidingai **teigiamo** rezultato priežastys, kai gydytojas konstatuoja nėštumo nebuvimą:

- Dauguma persileidimų nutinka per pirmąsias kelias savaites (50% per 1 -4 savaitę), todėl tai gali turėti įtakos klaidinančiam rezultatui.
- testas neatskiria normalaus nėštumo nuo negimdyvinio, todėl abiejuose atvejuose atsakymas bus teigiamas.
- moters ciklo viduryje hormonų padidėja ir gali būti arti nėštumą nustatančios ribos.
- kai kurie vėžiniai susirgimai pagamina hCG hormono.
- hormonų terapijos medikamentai gali padidinti hCG kiekį šlapime ir duoti teigiamą testo rezultatą.

Prieš menopauzę moters organizme padaugėja hCG hormono, bet dažniausiai neviršija nėštumą nustatančios ribos.

Medikamentai ar ligos (pvz. tofoblastinė liga) gali turėti įtakos hCG hormono kiekiui, dėl kurio irgi gali būti gautas klaidingas atsakymas. Nepriklausomai nuo viso to, kontraceptinių tablečių vartojimas niekaip neįtakoja testo rezultatų.

Perskaitykite instrukciją labai atidžiai prieš naudojimą.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nenaudokite po galiojimo laiko pabaigos. Laikyti kambario temperatūroje 4°C-30°C. Tik išoriniam naudojimui. Neardyti pakuotės. Šis testas yra skirtas naudoti tik diagnostikai in vitro sąlygomis.

0408

Art.: ZANL0026-LIT Rev00 2014-03